



# UDHËZIMET E PËRDORIMIT **MODULE VESHI**

PËR APARATE DËGJIMI WIDEX




**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

# MODULE VESHI PËR APARATE DËGJIMI BTE


*(Për t'u plotësuar nga audiologu)*

**Lloji i modulit tuaj të veshit:**


- PIPËZA TË ÇASTIT PËR APARATE DËGJIMI RIC/RITE

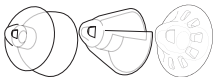

- 
- PIPËZA DHE VESHORE TË PERSONALIZUARA PËR APARATE DËGJIMI RIC/RITE

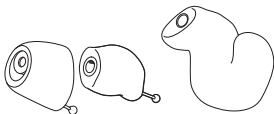


- 
- PIPËZA TË ÇASTIT PËR APARATE DËGJIMI ME TUB TË HOLLË 0.9 DHE 1.4

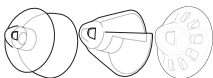

- PIPËZA TË PERSONALIZUARA PËR APARATE DËGJIMI ME TUB TË HOLLË 0.9 DHE 1.4



- 
- PIPËZA TË ÇASTIT DHE TË PERSONALIZUARA PËR APARATE DËGJIMI ME TUB TË HOLLË KLASIK

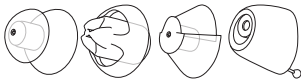

- 
- VESHORE PËR APARATE DËGJIMI ME TUB KLASIK



# PËRMBAJTJA

<b>PIPËZA TË ÇASTIT PËR MODELE RIC/RITE.....</b>	<b>6</b>
Veglat e pastrimit.....	7
Pastrimi.....	7
Mbrojtësja nga dylli.....	9
Ndërrimi i pipëzës.....	12
Lidhësja.....	13
<b>PIPËZA DHE VESHORE TË PERSONALIZUARA PËR MODELE RIC/RITE.....</b>	<b>15</b>
Veglat e pastrimit.....	16
Pastrimi.....	17
Mbrojtësja nga dylli.....	19
<b>PIPËZA TË ÇASTIT PËR TUB TË HOLLË 0.9 DHE 1.4.....</b>	<b>23</b>
Veglat e pastrimit.....	23
Pastrimi.....	24
Mbrojtësja nga dylli.....	25
Ndërrimi i pipëzës.....	28
Ndërrimi i Tubit të Hollë.....	29
Lidhësja.....	31
<b>PIPËZA TË PERSONALIZUARA PËR TUB TË HOLLË 0.9 DHE 1.4.....</b>	<b>32</b>
Veglat e pastrimit.....	33

Pastrimi.....	33
Mbrojtësja nga dylli.....	35
<b>PIPËZA TË ÇASTIT DHE TË PERSONALIZUARA PËR TUB TË HOLLË</b>	
<b>KLASIK.....</b>	<b>39</b>
Veglat e pastrimit.....	40
Pastrimi.....	41
Ndërrimi i pipëzës.....	43
Ndërrimi i tubit të hollë.....	45
Lidhësja.....	45
<b>VESHORET KLASIKE.....</b>	<b>49</b>
Veglat e pastrimit.....	49
Pastrimi.....	50
Ndërrimi i tubit.....	51
<b>SIMBOLET.....</b>	<b>52</b>

## PIPËZA TË ÇASTIT PËR MODELE RIC/RITE

Ky kapitull përshkruan si të pastrohen dhe të trajtohen lloje të ndryshme pipëzash të çastit për modelet RIC/RITE. Ilustrimet tregojnë një aparat dëgjimi me pipëz të hapur, por procedura nuk ndryshon edhe me pipëzat e tjera të çastit.




### SHËNIM

Moduli yt i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në ilustrim. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim që e konsiderojmë të nevojshëm.

## Veglat e pastrimit


Me aparatën e dëgjimit, do t'ju vijë veglat e pastrimit të mëposhtme.

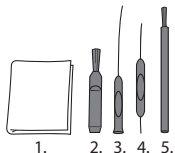

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e dyllit
5. Magneti i baterisë


## Pastrimi

### Pastrimi i modulit të veshit

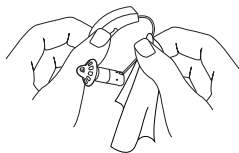

Sigurohuni që moduli i veshit të rrijë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë, lagështi ose papastërti të ngjashme. Pastrojeni telin aurikular me leckë pas përdorimit.

Për ta mbajtur pipëzën të pastër nga dylli, pastrojeni me furçën e vogël çdo ditë. Këshilloheni që ta bëni këtë çdo mëngjes, pasi të jetë lënë aparati i dëgjimit të thahet gjatë natës.

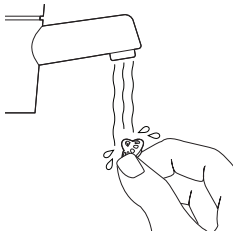

Mund edhe ta lani pipëzën e çastit në ujë të vakët **pasi ta keni shkëputur nga pjesa tjetër e modulit të veshit**. Lëreni të thahet gjatë natës.



Mos përdorni asnjë lloj lëngu ose dezinfektuesi për ta pastruar modulën e veshit.



Marrësi kurrë **nuk duhet** të bjerë në kontakt me ujin, sepse kjo mund ta dëmtojë.

Për udhëzime si ta ndërroni mbrojtësen nga dylli, shihni seksionin e mbrojtëses nga dylli.




## Mbrojtësja nga dylli


Mbrojtësja nga dylli ndihmon për ta mbrojtur aparatën nga dylli i veshit. Gjithnjë përdorni një mbrojtëse nga dylli Widex me aparatën tuaj të dëgjimit.

Kontrolloni rregullisht mbrojtësen nga dylli, për të mos lejuar që të bllokohet me dyllë, duke vepruar si vijon:

Më parë hiqeni pipëzën nga teli aurikular. Në qoftë se është mbledhur dyllë në mbrojtësen nga dylli, ndërrojeni mbrojtësen.

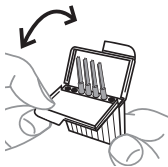

Hapeni kasetën e mbrojtëses nga dylli sikurse ilustrohet.

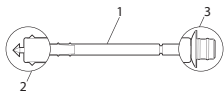


Mbrojtësja nga dylli konsiston në pjesët e mëposhtme:


1. Mbajtësja
2. Grepri heqës
3. Mbrojtësja nga dylli




Futni grepin heqës në mbrojtësen e përdorur.

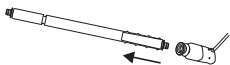

Nxirreni mbrojtësen e vjetër duke e tërhequr.

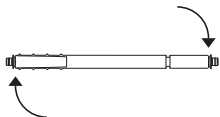

Kthejeni mbajtësen nga ana tjetër.

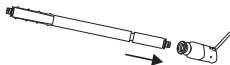

Futni mbrojtësen e re në vrimën e daljes së tingullit.

Nxirreni mbajtësen jashtë duke e tërhequr. Mbrojtësja e re nga dylli do të shkëputet automatikisht nga mbajtësja. Shtyjeni mbrojtësen nga dylli me kujdes kundrejt një sipërfaqeje, për t'u siguruar se ka zënë vend mirë. Shtyjeni pipëzën në vend.





Mbrojtësja nga dylli përdoret vetëm një herë dhe nuk duhet pastruar.




Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidhjeni tej dhe përdorni një të re.



Në qoftë se mbrojtësja nga dylli ju bie në vesh, lidhuni me mjekun ose audiologun që t'jua heqin. MOS provoni ta hiqni mbrojtësen nga dylli ju vetë.

## Ndërrimi i pipëzës

Duhet të ndryshoni pipëzën sikurse kërkohet. Lidhuni me audiologun, që të merrni pipëza të reja, ose në qoftë se pipëza nuk ju futet më mirë në vesh.

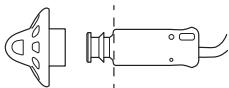

Shtyjeni pipëzën e re në marrës, derisa të arrijë pikën e treguar nga vija e ndërprerë.

Kur ta shtyni marrësin në pipëz, duhet ta ndieni kur të mbërthehet në pozicion me një klik.

## SHËNIM


Ka shumë rëndësi që pipëza të zërë vend mirë.



Mos u orvatni ta shkëputni telin aurikular nga aparati i dëgjimit.

## Lidhësja


Në qoftë se keni një pipëz të hapur ose një pipëz tip tulipan, mund ta përdorni lidhësen për t'u siguruar më mirë që pipëza të zërë vend në vesh. Veproni si vijon:

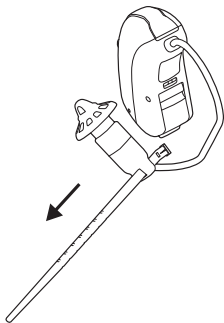

Tërhiqeni anën me majë të lidhëses  
përmes vrimës në anë të tubit.  
Vazhdoni të tërhiqni derisa lidhësja të  
ndalojë te doreza në fund.  
Tani moduli yt i veshit është gati për  
t'u përdorur.  
Vendoseni në mënyrë të tillë, që të  
qëndrojë rehatshëm në vesh.

## PIPËZA DHE VESHORE TË PERSONALIZUARA PËR MODELE RIC/RITE

Ky kapitull përshkruan si të pastrohen dhe të trajtohen lloje të ndryshme pipëzash dhe veshoresh të personalizuar për modelet RIC/RITE. Ilustrimet tregojnë një aparat dëgjimi me pipëz, përveçse kur specifikohet ndryshe.

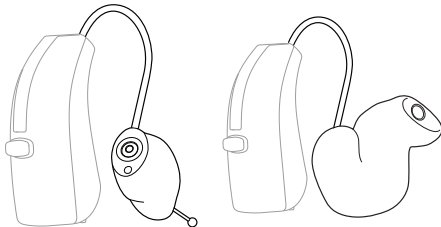

### SHËNIM


Gjithnjë përdorni kordonin nxjerrës, për ta nxjerrë pipëzën e personalizuar nga veshi.

## SHËNIM

Moduli juaj i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në broshurë.

### Veglat e pastrimit

Me aparatin e dëgjimit, do t'ju vijjnë veglat e pastrimit të mëposhtme.

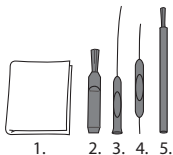

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e dyllit
5. Magneti i baterisë





## Pastrimi



Sigurohuni që moduli i veshit të rrijë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë, lagështi ose papastërti të ngjashme. Pastrojeni telin aurikular me leckë pas përdorimit.



Me anë të furçës së vogël ose leckës, hiqni dyllin që mund të jetë mbledhur rreth vrimës së daljes së tingullit. Në qoftë se vrima e daljes së tingullit është e bllokuar, ndërrojeni mbrojtësen nga dylli. MOS provoni të pastroni mbrojtësen nga dylli.

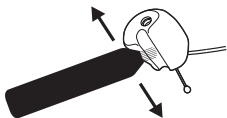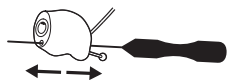

Pipëza/veshorja juaj mund të jenë të pajisura me vrimë ajrimi. Ilustrimet majtas tregojnë si t'i pastroni llojet e ndryshme të vrimave të ajrimit.



Moduli i veshit asnjëherë nuk duhet të bjerë në kontakt me lëngje, të tilla si uji ose solucione pastrimi.



Asnjëherë mos u orvatni të shkëputni telin aurikular nga pipëza/veshorja e personalizuar ose aparati i dëgjimit, meqë ky veprim mund ta dëmtojë telin aurikular.



Mos e hiqni aparatin e dëgjimit nga veshi, duke e tërhequr nga teli aurikular.


## **Mbrojtësja nga dylli**

Mbrojtësja nga dylli ndihmon për ta mbrojtur aparatin nga dylli i veshit. Gjithnjë përdorni një mbrojtëse nga dylli Widex me aparatin tuaj të dëgjimit.


Kontrolloni rregullisht mbrojtësen nga dylli, për të mos lejuar që të bllokohet me dyllë.



MOS e hiqni pipëzën/veshoren e personalizuar nga teli aurikular.

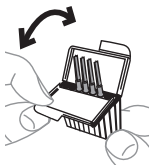

Hapeni kasetën e mbrojtëses nga dylli sikurse ilustrohet.

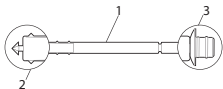


Mbrojtësja nga dylli konsiston në pjesët e mëposhtme:


1. Mbajtësja
2. Grepin heqës
3. Mbrojtësja nga dylli




Futeni grepin heqës në mbrojtësen e përdorur.

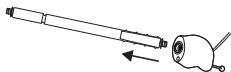

Nxirreni mbrojtësen e vjetër duke e tërhequr.

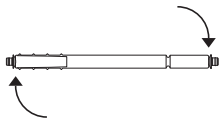

Kthejeni mbajtësen nga ana tjetër.

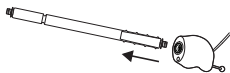

Futni mbrojtësen e re në vrimën e daljes së tingullit.

Nxirreni mbajtësen jashtë duke e tërhequr. Mbrojtësja e re nga dylli do të shkëputet automatikisht nga mbajtësja. Shtyjeni mbrojtësen nga dylli me kujdes kundrejt një sipërfaqeje të sheshtë, për t'u siguruar se ka zënë vend mirë.





Mbrojtësja nga dylli përdoret vetëm një herë dhe nuk duhet pastruar.



Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidheni tej dhe përdorni një të re.



Në qoftë se mbrojtësja nga dylli ju bie në vesh, lidhuni me mjekun ose audiologun që t'jua heqin. MOS provoni ta hiqni mbrojtësen nga dylli ju vetë.

## PIPËZA TË ÇASTIT PËR TUB TË HOLLË 0.9 DHE 1.4

Ky kapitull përshkruan si të pastroni dhe të trajtoni pipëzat e çastit për aparate dëgjimi me Tub të Hollë 0.9 dhe 1.4.




### SHËNIM

Moduli juaj i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në ilustrim. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim që e konsiderojmë të nevojshëm.


### Veglat e pastrimit

Me aparatën e dëgjimit, do t'ju vijjnë veglat e pastrimit të mëposhtme.

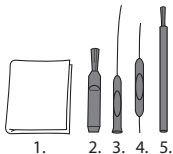

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e dyllit
5. Magneti i baterisë


## Pastrimi

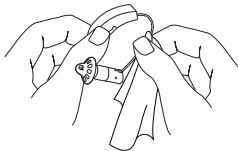

Sigurohuni që moduli i veshit të rrijë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë, lagështi ose papastërti të ngjashme. Pastrojeni tubin me leckë pas përdorimit.

Për ta mbajtur pipëzën të pastër nga dylli, pastrojeni me furçën e vogël çdo ditë. Këshilloheni që ta bëni këtë çdo mëngjes, pasi të jetë lënë aparati i dëgjimit të thahet gjatë natës.



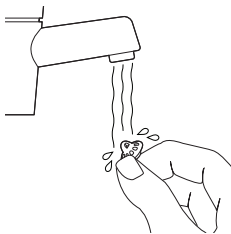

Mund edhe ta lani pipëzën e çastit në ujë të vakët**pasi ta keni shkëputur nga pjesa tjetër e modulit të veshit**. Lëreni të thahet gjatë natës.



Mos përdorni asnjë lloj lëngu ose dezinfektuesi për ta pastruar modulën e veshit.



Për udhëzime si ta ndërroni mbrojtësen nga dylli, shihni seksionin e mbrojtëses nga dylli.

## **Mbrojtësja nga dylli**

Mbrojtësja nga dylli ndihmon për ta mbrojtur aparatën nga dylli i veshit. Gjithnjë përdorni një mbrojtëse nga dylli Widex me aparatën tuaj të dëgjimit.

Kontrolloni rregullisht mbrojtësen nga dylli, për të mos lejuar që të bllokohet me dyllë, duke vepruar si vijon:

Më parë hiqeni pipëzën nga tubi. Në qoftë se është mbledhur dyllë në mbrojtësen nga dylli, ndërrojeni. MOS provoni të pastroni mbrojtësen nga dylli.

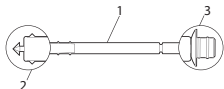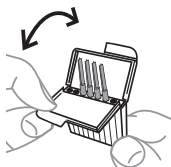


Hapeni kasetën e mbrojtëses nga dylli sikurse ilustrohet.

Mbrojtësja nga dylli konsiston në pjesët e mëposhtme:


1. Mbajtësja
2. Grepin heqës
3. Mbrojtësja nga dylli




Futni gripin heqës në mbrojtësen e përdorur.

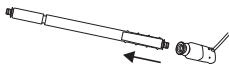

Nxirreni mbrojtësen e vjetër duke e tërhequr.

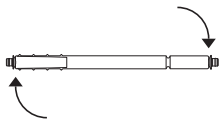

Kthejeni mbajtësen nga ana tjetër.

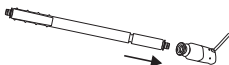

Futni mbrojtësen e re në vrimën e daljes së tingullit.

Nxirreni mbajtësen jashtë duke e tërhequr. Mbrojtësja e re nga dylli do të shkëputet automatikisht nga mbajtësja. Shtyjeni mbrojtësen nga dylli me kujdes kundrejt një sipërfaqeje, për t'u siguruar se ka zënë vend mirë. Shtyjeni pipëzën në vend.



Mbrojtësja nga dylli përdoret vetëm një herë dhe nuk duhet pastruar.




Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidheni tej dhe përdorni një të re.



Në qoftë se mbrojtësja nga dylli ju bie në vesh, lidhuni me mjekun ose audiologun që t'jua heqin. MOS provoni ta hiqni mbrojtësen nga dylli ju vetë.

## **Ndërrimi i pipëzës**

Duhet të ndryshoni pipëzën sikurse kërkohet. Lidhuni me audiologun, që të merrni pipëza të reja, ose në qoftë se pipëza nuk ju futet më mirë në vesh.

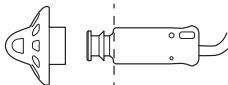

Shtyjeni pipëzën e re në Tubin e Hollë, derisa të arrijë pikën e treguar nga vija e ndërprerë. Kur ta shtyni fundin e tubit në pipëz, duhet ta ndieni kur të mbërthehet në pozicion me një klik.


## SHËNIM

Ka shumë rëndësi që pipëza të zërë vend mirë.


### **Ndërrimi i Tubit të Hollë**

Ndërrojini tubin sikurse kërkohet. Për t'u furnizuar me pjesë, lidhuni me audiologun.


Përdorni veglën speciale që ju është dhënë me Tubin e Hollë, për ta hequr tubin nga aparati i dëgjimit. **Veprohi si vijon:**

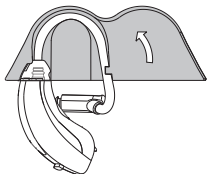

1. Vendoseni tubin në vegël,  
sikurse tregohet në ilustrim.

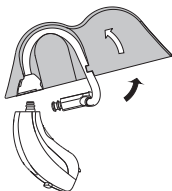


2. Ngrijeni modulën e veshit për ta  
hequr nga aparati i dëgjimit duke  
e mbajtur me një kënd, sikurse  
tregohet.

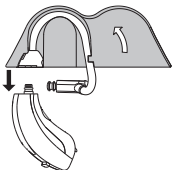

3. Pastaj vendoseni tubin e ri në  
vegël dhe mbërthejeni me një klik  
në aparatin e dëgjimit.

## Lidhësja


Në qoftë se keni një pipëz të hapur ose një pipëz tip tulipan, mund ta përdorni lidhësen për t'u siguruar më mirë që pipëza të zërë vend në vesh. Veproni si vijon:

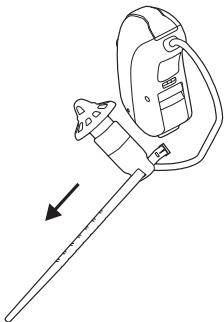

Tërhiqeni anën me majë të lidhëses përmes vrimës në anë të tubit. Vazhdoni të tërhiqni derisa lidhësja të ndalojë te doreza në fund. Tani moduli yt i veshit është gati për t'u përdorur. Vendoseni në mënyrë të tillë, që të qëndrojnë rehatshëm në vesh.

## PIPËZA TË PERSONALIZUARA PËR TUB TË HOLLË 0.9 DHE 1.4

Ky kapitull përshkruan si të pastroni dhe të trajtoni pipëzat e personalizuara për aparate dëgjimi me Tub të Hollë 0.9 dhe 1.4.

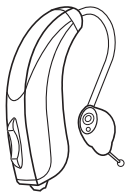

### SHËNIM

Moduli juaj i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në ilustrim. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim që e konsiderojmë të nevojshëm.


### SHËNIM

Gjithnjë përdorni kordonin nxjerrës, për ta nxjerrë **pipëzën e personalizuar** nga veshi.



## Veglat e pastrimit

Me aparatën e dëgjimit, do t'ju vijë veglat e pastrimit të mëposhtme.

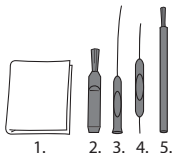

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e dyllit
5. Magneti i baterisë

## Pastrimi

### Pastrimi i pipëzës së personalizuar





Sigurohuni që moduli i veshit të rrijë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë, lagështi ose papastërti të ngjashme. Pastrojeni tubin me leckë pas përdorimit.



Me anë të fuqës së vogël ose leckës, hiqni dyllin që mund të jetë mbledhur rreth vrimës së daljes së tingullit.

Në qoftë se vrima e daljes së tingullit është e bllokuar, ndërrojeni mbrojtësen nga dylli. MOS provoni të pastroni mbrojtësen nga dylli.

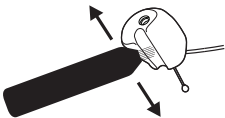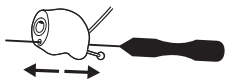

Pipëza juaj mund të jetë e pajisur me vrimë ajrimi. Ilustrimet më poshtë tregojnë si t'i pastroni llojet e ndryshme të vrimave të ajrimit.



Moduli i veshit asnjëherë nuk duhet të bjerë në kontakt me lëngje, të tilla si uji ose solucione pastrimi.



Mos e hiqni aparatën e dëgjimit nga veshi, duke e tërhequr nga tubi.


## Mbrojtësja nga dylli

Mbrojtësja nga dylli ndihmon për ta mbrojtur aparatën nga dylli i veshit. Gjithnjë përdorni një mbrojtëse nga dylli Widex me aparatën tuaj të dëgjimit.


Kontrolloni rregullisht mbrojtësen nga dylli, për të mos lejuar që të bllokohet me dyllë.



MOS e hiqni pipëzën e personalizuar nga tubi.

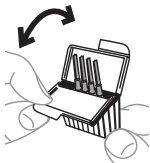

Hapeni kasetën e mbrojtëses nga dylli sikurse ilustruhet.

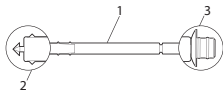


Mbrojtësja nga dylli konsiston në pjesët e mëposhtme:


1. Mbjajtësja
2. Grepin heqës
3. Mbrojtësja nga dylli




Futeni gripin heqës në mbrojtësen e përdorur.

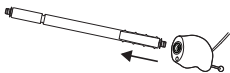

Nxirreni mbrojtësen e vjetër duke e tërhequr.

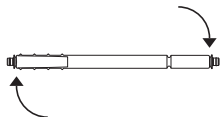

Kthejeni mbajtësen nga ana tjetër.

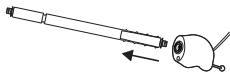

Futni mbrojtësen e re në vrimën e daljes së tingullit.

Nxirreni mbajtësen jashtë duke e tërhequr. Mbrojtësja e re nga dylli do të shkëputet automatikisht nga mbajtësja. Shtyjeni mbrojtësen nga dylli me kujdes kundrejt një sipërfaqeje të sheshtë, për t'u siguruar se ka zënë vend mirë.





Mbrojtësja nga dylli përdoret vetëm një herë dhe nuk duhet pastruar.




Në qoftë se mbrojtësja nga dylli nuk zë vend mirë, hidheni tej dhe përdorni një të re.



Në qoftë se mbrojtësja nga dylli ju bie në vesh, lidhuni me mjekun ose audiologun që t'jua heqin. MOS provoni ta hiqni mbrojtësen nga dylli ju vetë.

## PIPËZA TË ÇASTIT DHE TË PERSONALIZUARA PËR TUB TË HOLLË KLASIK

Ky kapitull përshkruan si të pastroni dhe të trajtoni pipëza të ndryshme për modele BTE me tub të hollë klasik.

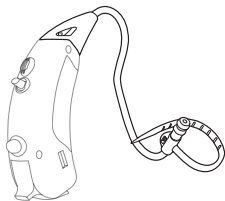


### SHËNIM

Moduli juaj i veshit mund të mos jetë i njëjtë me atë që tregohet në broshurë. Ne gjithashtu ruajmë të drejtën të bëjmë çdo ndryshim që e konsiderojmë të nevojshëm.

## Veglat e pastrimit



Me aparatën e dëgjimit, do t'ju vijë veglat e pastrimit të mëposhtme.

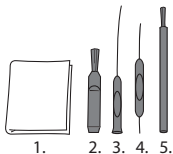

1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e dyllit
5. Magneti i baterisë




## Pastrimi

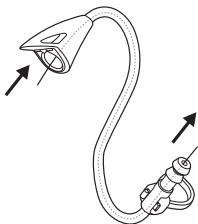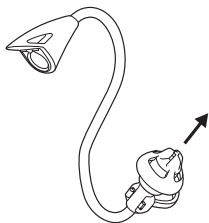

Hiqeni me kujdes pipëzën nga tubi.

Në qoftë se keni pipëz të personalizuar, nuk ka nevojë që ta hiqni, për ta pastruar tubin.

Përdorni një fill pastrues për ta pastruar tubin. Kalojeni përmes tubit. Tërhiqeni fillin nga skaji tjetër. Për më shumë informacion se ku t'i gjeni fijet pastruese, këshillohuni me specialistin tuaj të dëgjimit.

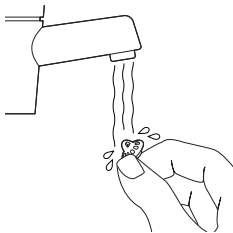



Mund edhe ta lani pipëzën e  
çastit në ujë të vakët **pasi ta keni  
shkëputur nga pjesa tjetër e  
modulit të veshit**. Lëreni të  
thahet gjatë natës.



Kurrë mos përdorni alkool ose solucione të tjera pastrimi për ta  
pastruar modulën e veshit, pse kjo mund të shkaktojë çngjyrosje.


## Ndërrimi i pipëzës

### Vendosja e një pipëze të çastit në tub

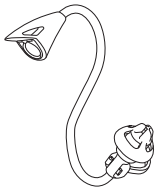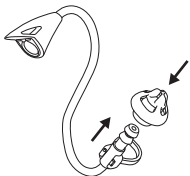

Futeni me kujdes tubin në pipëz, derisa të arrijë fundin. Ka shumë rëndësi që pipëza të zërë vend mirë.

## Vendosja e një pipëze të personalizuar në tub

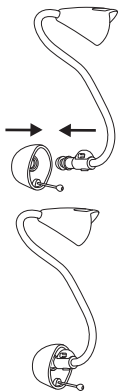


Mbajeni pipëzën e personalizuar dhe shtyjeni me kujdes tubin që të zërë vend në pipëz, sikurse tregohet në ilustrim. Përdorni thoin për ta shtyrë tubin aq sa të jetë e mundur.

## Ndërrimi i tubit të hollë



Ngrijeni tubin e hollë për ta hequr nga aparati i dëgjimit duke e tërhequr pjerrët për nga pas, sikurse tregohet

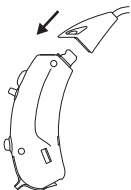


Mbërthejeni tubin e hollë në pjesën e sipërme të aparatit të dëgjimit, sikurse tregohet në ilustrim.

## Lidhësja

Lidhësja e integruar nuk përdoret me modelet me pipëz të dyfishtë dhe duhet të hiqet krejt duke e prerë.


Në qoftë se po përdorni një pipëz të hapur ose një pipëz tip tulipan, duhet ta shkurtoni lidhësen për të krijuar një lak me madhësinë e duhur, në mënyrë që pipëza të zërë vend mirë në vesh. Për ta shkurtuar lidhësen, veproni si më poshtë:

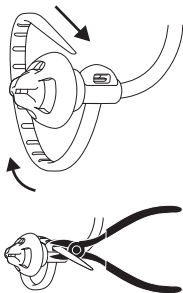

### **Shembulli 1**


Tërhiqeni majën e lidhëses përmes vrimës së vogël në anë të tubit.

Kur laku arrin madhësinë e duhur, preni pjesën e tepërt me gërshtërë ose me ndonjë vegël të ngjashme.

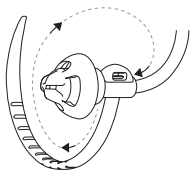

## Shembulli 2

Kthejeni lidhësen në drejtimin e treguar nga vija e ndërprerë dhe shigjetat.

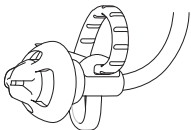

Futeni majën e lidhëses përmes vrimës së vogël në anë të tubit, sikurse ilustrohet, për të formuar një lak në trajtë zemre.



Kur laku arrin madhësinë e duhur, kthejeni modulën nga ana tjetër dhe prejeni pjesën e tepërt të lidhëses me gërrshërë ose me ndonjë vegël të ngjashme.

Kur laku i lidhëses ka madhësinë e duhur, aparati i dëgjimit do të rrijë rehatshëm në vesh dhe moduli i veshit do të zërë vend mirë brenda në vesh dhe mbi të.

### **SHËNIM**

Sigurohuni që skaji i lakut të lidhëses është barazuar me vrimën e vogël dhe se nuk ka buzë të mprehta, meqë këto mund ta irritojnë veshin. Kontrolloni për buzë të mprehta me majën e gishtit.

### **SHËNIM**

Lidhësja e integruar NUK përdoret me modelet me pipëz të personalizuar dhe duhet të hiqet krejt duke e prerë.



## VESHORET KLASIKE


Ky kapitull përshkruan si të pastroni dhe të trajtoni veshoret klasike për modelet BTE.

### SHËNIM

Veshorja jote mund të mos jetë e njëjtë me atë që tregohet në broshurë.

### Veglat e pastrimit

Me aparatën e dëgjimit, do t'ju vijjnë veglat e pastrimit të mëposhtme.

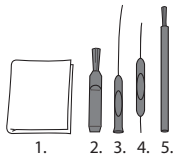


1. Lecka
2. Furça
3. Vegla e gjatë për heqjen e dyllit
4. Vegla e shkurtër për heqjen e dyllit
5. Magneti i baterisë


## Pastrimi




Sigurohuni që moduli juaj i veshit të jetë gjithnjë i pastër dhe pa dyllë dhe lagështi. Fshijeni modulën e veshit me leckë, pas përdorimit.

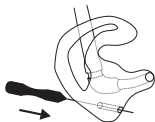

Në qoftë se ai ka vrimë ajrimi, pastrojeni me veglën e heqjes së dyllit.

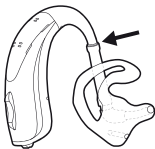


Shkëputeni rregullisht tubin me veshoren nga kllapa e veshit e aparatit të dëgjimit.

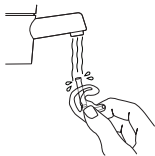

Shpëlajeni mirë tubin dhe veshoren me ujë të vakët.

Lërimi të thahen gjatë natës.

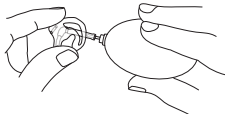

Në qoftë se ka mbetur lagështi në veshore ose në tub, përdorni një tharëse ose një pajisje të ngjashme për t'i tharë para se ta lidhni tubin me kllapën e veshit.



Kurrë mos përdorni alkool ose solucione të tjera pastrimi për ta pastruar modulën e veshit, pse kjo mund të shkaktojë çngjyrosje.

## **Ndërrimi i tubit**

Në qoftë se tubi i modulit tuaj të veshit çahet, duhet ta zëvendësoni.

Lidhuni me audiologun, që të merrni një tub të ri, ose në qoftë se veshorja nuk ju futet më mirë në vesh.

## SIMBOLET

Simbolet që përdoren zakonisht nga Widex A/S në etiketat e pajisjeve mjekësore (etiketat/Udhëzimet e Përdorimit/etj.)

### Simboli Titulli/Përshkrimi

---



#### Fabrikanti

Produkti është prodhuar nga fabrikanti, emri dhe adresa e të cilit gjenden përbri simbolit. Nëse është rasti, mund të jepet edhe data e fabrikimit.

---



#### Numri i katalogut

Numri i katalogut (i artikullit) i produktit.

---



#### Këshillohuni me udhëzimet e përdorimit

Udhëzimet e përdorimit përmbajnë informacion të rëndësishëm për t'u ndjekur (paralajmërimet dhe njoftime kujdesi), dhe duhen lexuar para se të përdoret produkti.

---



#### Paralajmërim

Teksti i shënuar me një simbol të paralajmërimit duhet lexuar para se të përdoret produkti.

---

## Simboli Titulli/Përshkrimi

---



### Shenja WEEE

“Mos e hidhni në plehtrat komunale”



Kur ka ardhur koha që të eliminohet një produkt, ai duhet dërguar te një pikë grumbullimi e specializuar për riciklimin dhe rikuperimin, për të parandaluar rrezikun e dëmtimit të mjedisit ose të shëndetit të njeriut, si rezultat i pranisë së lëndëve të rrezikshme.

---



### Shenja CE

Produkti pajtohet me kërkesat e cilësuar në direktivat europiane të shënjimit BE.

---



### Shenja RCM

Produkti pajtohet me kërkesat rregullatore të sigurisë elektrike, spektrit EMC dhe radiovalor për produkte për tregun në Australi ose në Zelandën e Re.

---




### Interferenca

Në afërsi të produktit mund të ndodhë interferencë elektromagnetike.

---





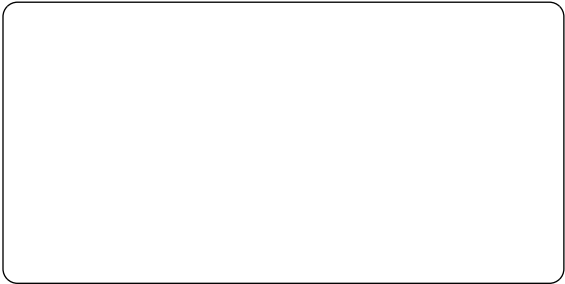

**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark

[www.widex.com](http://www.widex.com)

**Manuall nr.:**  
9 514 0368 045 #01  
**Botuar:**  
2016-05

